

日本一歴史のある抱っこひもの会社を作る
介護補助や災害時の避難時に最適なおんぶひも。

らくらくおんぶひも

車椅子が使用できない場所や階段等を使った緊急避難時に便利です。

足元の視界の確保や両手が自由になり、手すりをしっかりとつかむことも出来るので、安全に避難ができます。



参考 写真のお子さま：身長 110cm、体重 18kg

ひもを結ぶだけなので、
初心者の方でも
簡単におんぶできます。

安全かつ快適なおんぶ。

腰にのせるようにおんぶができます。

肩と腰で支えられることによって、安定性も向上しました。

肩ひもには厚手のクッション材も入っています。

オリジナルラダーでらくらく調整

背中にのせてベルトを引くだけの簡単調整。
ラッキーオリジナルラダー（YKK社・日本製・引張り強度 70kg 以上あります）なので、高い安全性と耐久性を兼ね備えています。

わかりやすい
動画説明は
こちらから



15,000 円（税別）

身長約 120cm ～約 150cm（体重約 43kg）まで対応。

素手と変わらないおんぶとそれ以上の安心感を目指しました。

らくらくおんぶひも

ご使用になる前に、よくお読みのうえ正しくお使いください。


また、本書は必ず保管してください。

本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主な素材が繊維であるため、使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。

注 意

- ・着脱時は可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。
他の人に介添えいただくとより安全です。
- ・使用前には、やぶれ、ほつれ、キズなど破損していないか確認してください。
破損してる場合は使用しないでください
- ・装着後、緩みがないか都度確認してください。
使用中の大きな前かがみや、よこ曲げなどをすると落下する恐れがあります。

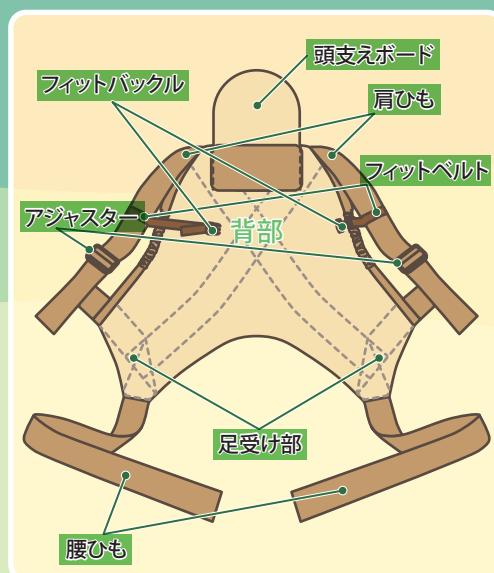

ベッドかソファの上に**おんぶひも**を広げます。



おんぶされる方が背中に密着するように、**肩ひも**の長さを調節します。



おんぶひもの上におんぶする方を座らせます。

ポイント アジャスターの使い方



足受け部に、足を下から受けるようにして**腰ひも**を持って立ち上がります。



左右の**肩ひも**が脇下に当たるようにして背中に引きよせます。



ポイント

お尻の高さを**使用される方の腰**より上位置で使用するほうが支える負担が少なくなります。



肩ひもを肩に掛け、**フィットバックル**をとめます。
※**肩ひも**の長さを、あらかじめ調節しておくとお楽です。



腰ひもをしっかりと結んで完了です。

ポイント

頭支えボードは取り外して使用することもできます。



お手入れ方法

洗濯については製品に縫い付けの組成表示ラベルを参照ください。

軽い汚れの場合は、濡らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。

※仕様が予告なしに変わることがあります。

※製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

販売元

ALTECH

有限会社アルテックブレース

〒4910838 愛知県一宮市猿海道2丁目11番9

TEL : (0586) 23-6808

FAX : (0586) 23-6818

E-mail : altech@aqua.ocn.ne.jp

製造元

ラッキー工業株式会社

Lucky
SINCE 1934

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8

TEL : (0585) 45-7425

HP : <http://www.lucky-baby.co.jp/>

ラッキー工業は日本で一番長い歴史を持つ抱っこひもメーカー。
製品安全協会第一号認定工場などの安心と80年を越すお客様との信頼が弊社の強みです。